

# 空中监测健康护颈枕操作说明



扫码下载APP

## 长按开机



长按LOGO三秒以上直至左侧亮起LED灯



待灯光由绿色转变为蓝色，护颈枕成功开机

## 蓝牙连接设备



打开空中健康监测APP，确认打开手机的蓝牙开关后，点击‘START’按钮



扫描护颈枕上的二维码，与护颈枕进行连接

## 佩戴设备



入座，并将护颈枕按图示位置佩戴好



将护颈枕上的耳夹夹在左耳的耳垂处(夹之前可以用手揉搓至微微发热，使结果更准确)

## 实时查看数据



检测过程中可随时查看实时波动及各项数据



点击分析数据按钮可以查看本地分析结果

## 上传数据



待飞机落地后，打开APP，点击上传按钮，上传检测数据至后台



后台进行数据解析并在几分钟内生成专业的健康报告

## 查看报告



收到报告成功生成的短信后，打开APP，点击底部栏的‘历史数据’



找到最近一次的监测报告，点击‘下载原始数据’，然后查看健康报告